



Lääkehappipullot

Elämää helpottavia ratkaisuja



Lääkehappipullojen riittoisuus

VIRTAUS				
l/min	2 l pullo	5 l pullo	7 l pullo	10 l pullo
1	6 h	15 h	22 h	30 h
2	3 h	8 h	11 h	15 h
3	2 h	5 h	7 h	10 h
4	1 h 30 min	4 h	5 h	8 h
5	1 h	3 h	4 h	6 h
10	30 min	1 h 30 min	2 h	3 h
15	20 min	1 h	1 h 20 min	2 h

Turvapullojen painot	
2 L	6,2 kg
5 L	11 kg
10 L	17 kg

Komposiittipullojen painot	
2 L	3,3–4,2 kg (riippuu venttiilistä)
7 L	8,2 kg

Laskelmissa on käytetty kaavaa (paine X tilavuus)/virtaus. Tulokset on pyöristetty alaspäin. Laskelmissa ei ole otettu huomioon virtaustarkkuutta.



2 l komposiittiturvapullo
(uusi valkoinen pulloväri ja uusi
Viproxy-venttiili)



2 l komposiittiturvapullo



5 l turvapullo



Turvapullon/komposiittiturvapullon käyttöohje

Lääkehappiturvapulloissa käytetään kahdentyyppiisiä venttiilejä: **Cahouet** ja **Viproxy**. Niiden liittimet ja toimintaperiaate ovat samanlaiset.

1. Poista venttiilistä sinetti ennen käyttöönottoa. Tarkasta painemittarista **4**, että pullossa on riittävästi happea.
2. Liitä happiviikset/-maski letkuliittimeen **1**.
3. Avaa lääkehappipullo kääntämällä pääventtiiliä **2** ½ kierrosta vastapäivään (+).
4. Säädä lääkemääräyksen mukainen happivirtaus pullon päällä olevasta virtaussäätimestä **3**.
Happivirtauksen säätövaihtoehdot:
Cahouet: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15
Viproxy: ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25
5. Lopettaessasi happihoidon käännä pullon pääventtiili **2** kiinni (½ kierrosta myötäpäivään (-)).
6. Sulje virtaussäädin **3**. Muista aina sulkea happipullo lopettaessasi hapen käytön!

Kuvaselitykset

- 1** Hapen ulostulon letkuliitin happiviiksille/-maskille
- 2** Pullon pääventtiili
- 3** Virtaussäädin
- 4** Painemittari pullon täyttöasteen lukemista varten:



Vihreä alue ● = normaali käyttöalue

Punainen alue ● = pullo miltei tyhjä

Huomioitavaa **Cahouet**-venttiilin kohdalla: Painemittarin ollessa punaisella alueella ●, on pullon käyttö lopetettava. Tällöin virtaus on pienempi kuin mitä on säädetty ja kaasun riittävyys on hyvin lyhytaikainen.

- 5** Pikaliitin virtaussäädintä ja kostutinpulloa varten

Letkuliitinyhteen ja pikaliitinyhteen yhtäaikainen käyttö on kielletty, koska tällöin virtaustarkkuus tai -määrä ei toteudu säädetyn mukaisesti.

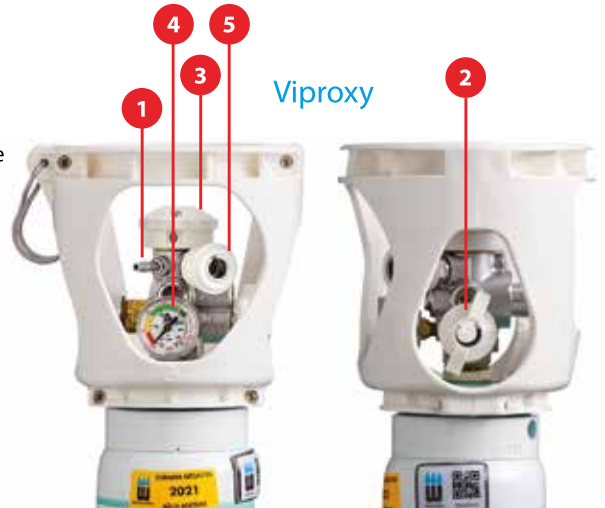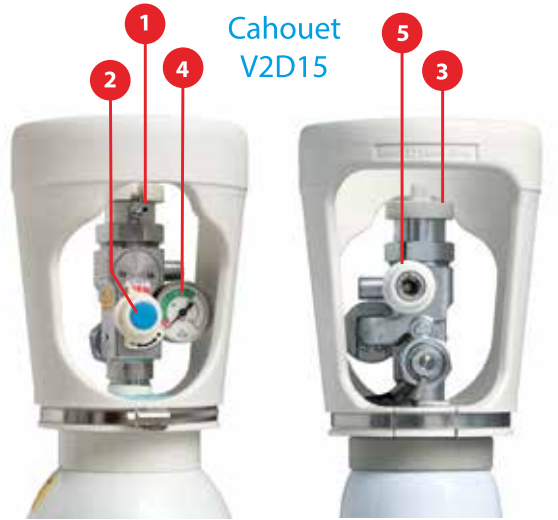

Kaikissa pulloissa virtaussäädin kiinteästi



TILAUSOHJE

Lääkärin allekirjoittaman reseptin kopio ja täytetty tilauslomake postitetaan tai faksataan Woikoski Medicalille:

Oy Woikoski Ab / Woikoski Medical, PL 1, 04020 Woikoski.
Puh: 040 166 2004, faksi 020 605 1812,
sähköposti: kotihappihoito@woikoski.fi

Tilauslomakkeen sekä lisätietoa kotihappihoidosta löydät osoitteesta www.woikoski.fi.

**Laaja
noutopiste-
verkosto –
katso lähin
woikoski.fi**

